



SpeediCath Control – stark in der Form,
leicht in der Handhabung

SpeediCath

 Coloplast



SpeediCath Control – Schnelligkeit trifft auf Kontrolle

Der neue **SpeediCath Control** verbindet die bewährte **SpeediCath**-Technologie mit dem Extra-Stück Kontrolle. Für eine noch leichtere Handhabung und Präzision beim Katheterisieren.

⊗ kontrolliert | die Form

SpeediCath Control verfügt über einen integrierten Stabilisator, der den Katheter während des gesamten Katheterisierungsvorgangs in Form hält. Er bietet mehr Kontrolle über die Katheterspitze und ermöglicht so ein bequemerer, zielgenaues und sicheres Einführen. **SpeediCath Control** ist besonders gut geeignet für Anwender mit eingeschränkter Handfunktion.

⊗ einfach | die Anwendung

SpeediCath Control ist bereits in eine sterile Kochsalzlösung eingebettet und damit sofort gebrauchsfähig. Ein Hinzufügen externer Flüssigkeit ist nicht notwendig. Hierdurch werden nicht nur lästige Wartezeiten verhindert, sondern auch das Infektionsrisiko minimiert.


⊗ sicher | die Oberfläche

SpeediCath Control trägt eine innovative Katheterbeschichtung, die einen perfekten Übergang zwischen den besonders abgerundeten, sanften Augen und der Katheteroberfläche bietet. Die Schleimhaut gleitet über einen extrem glatten Katheterkörper, was dem Patienten eine sicheres, angenehmes und reibungsarmes Einführen ermöglicht. Das Risiko eines urethralen Mikrotraumas wird minimiert.

Sicher in der Anwendung

In vielen Fällen wird die 8 cm lange CH 16-Verstärkung nicht in die Harnröhre mit eingeführt. Lediglich der schmale, 27 cm lange, CH 12-Part wird Richtung Blase geschoben.

In einigen Fällen wird der verstärkte Teil des Katheters ca. 3 cm weit mit in den sehr flexiblen ersten Teil der Harnröhre eingeführt. Der vollständig beschichtete Übergang vom Stabilisator zum Katheter ist so sanft, dass er kaum spürbar ist.

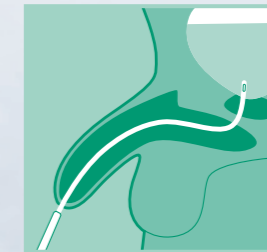

Katheter wird bis zum Stabilisator eingeführt




Stabilisator wird bis zu 3 cm mit eingeführt

SpeediCath Control – eine Verbindung, die Kontrolle schafft


Kontrolliert und sicher katheterisieren durch integrierten CH 16-Stabilisator

Einfach in der Handhabung

In der Rehabilitation des querschnittgelähmten Menschen ist eine der wichtigsten Basisversorgungen bei einem neurologischen Niveau C4–C7 die Ausprägung der Funktionshand. Im Rahmen einer verbesserten Nutzung von Einmalkathetern erleichtert **SpeediCath Control** die Einführung in die Harnröhre mit einer Funktionshand. Besonders mit dem Interdigitalgriff oder Flechtgriff ist eine Anwendung des Katheters in der aseptischen Technik möglich.

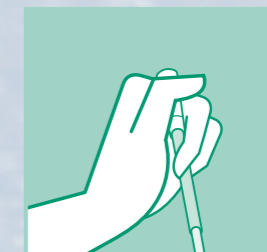

Interdigitalgriff

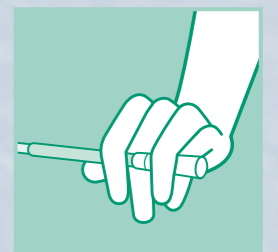

Flechtgriff



⊗ kontrollierte Form ⊗ einfache Anwendung ⊗ sichere Oberfläche