



# SpeediCath Compact – so einfach ist das!

Desinfizieren Sie bitte zuerst die Hände und anschließend den Genitalbereich. **SpeediCath Compact** ist in eine sterile Flüssigkeit gebettet. Bevor Sie den Katheter öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, mit der Katheterisierung zu beginnen.

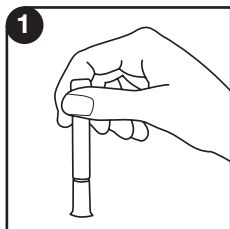


## 1 Richtige Haltung

Halten Sie den Katheter mit dem Fuß nach unten, wie auf der Zeichnung angeben.

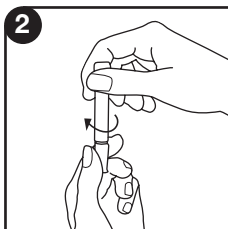


## 2 Öffnen

Brechen Sie die Versiegelung auf, indem Sie die beiden ineinander gesteckten Röhrchen vorsichtig in entgegengesetzte Richtung drehen.

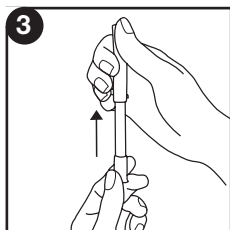


## 3 Auseinander ziehen

Ziehen Sie die Röhrchen langsam auseinander. Das äußere Röhrchen ist der Kathetergriff, im inneren liegt der Katheter.

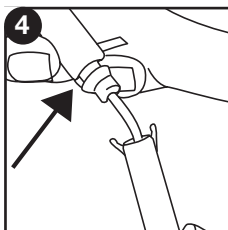


## 4 Einrasten

Achten Sie darauf, dass der Katheter spürbar „einrastet“.

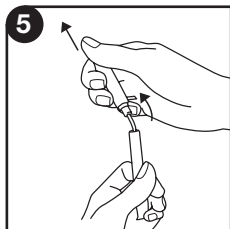

## 5 Freilegen des Katheters

Halten Sie das äußere Röhrchen fest und ziehen Sie das innere vorsichtig ab. Entleeren Sie die Flüssigkeit aus dem inneren Röhrchen. So können Sie es später zur diskreten Entsorgung benutzen.

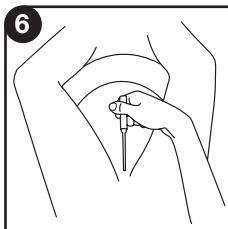

## 6 Einführen

Nun ist der Katheter einsatzbereit und Sie können wie gewohnt katheterisieren.

Coloplast GmbH  
Postfach 70 03 40  
22003 Hamburg  
Tel.: 0 40 / 66 98 07-77  
Fax: 0 40 / 66 98 07-48  
www.coloplast.de  
E-Mail: devks@coloplast.com

2 6 5 6 7 5 2 7 8  
**01 80 - COLOPLAST**

Beratungs-Service für Deutschland,  
0,06 € pro Anruf (aus d. dt. Festnetz)

 **Coloplast**