

# Sicherer Schutz mit Modellierstreifen oder Paste

## Benötigte Materialien

- Coloplast Modellierstreifen (alkoholfrei)
- Coloplast Paste


Anwendung bei Hautunebenheiten in der Stomaumgebung wie Falten und Narben oder bei schwierig zu versorgenden Stomata sowie bei flüssigen Ausscheidungen (Ileo- bzw. Urostomie)




Tragen Sie ein Stück des Modellierstreifens oder der Paste auf die Haut auf und drücken Sie dieses an.



Formen Sie den Modellierstreifen oder die Paste um das Stoma herum.

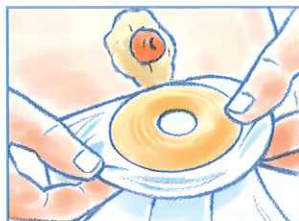

Legen Sie eine neue Versorgung mit einer Hand an und drücken Sie diese mit der flachen Hand fest.

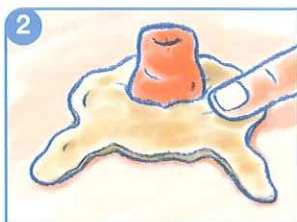

## 1 Alternative Methode zur Anwendung des Modellierstreifens oder der Paste

Der Modellierstreifen oder die Paste kann direkt auf der Klebefläche des Hautschutzes um die Öffnung herum geformt werden.

## 2 Anwendung des Modellierstreifens oder der Paste bei Vertiefungen und Hautunebenheiten

Bei Vertiefungen oder Unebenheiten formen Sie den Modellierstreifen oder die Paste mit angefeuchteten Fingern so, dass die Lücken ausgefüllt werden.

## Deutschland

Coloplast GmbH  
Postfach 70 03 40  
22003 Hamburg  
Tel.: 0 40 / 66 98 07-77  
Fax: 0 40 / 66 98 07-48  
[www.coloplast.de](http://www.coloplast.de)  
E-Mail: [devks@coloplast.com](mailto:devks@coloplast.com)

## Österreich

Coloplast GmbH  
Thomas-Klestil-Platz 10  
1030 Wien  
Tel.: 01 / 7 07 57 51 0  
Fax: 01 / 7 07 57 51 30  
[www.coloplast.at](http://www.coloplast.at)  
E-Mail: [atbestellung@coloplast.com](mailto:atbestellung@coloplast.com)

## Schweiz

Coloplast AG  
Euro-Business-Center  
Blegistrasse 1  
6343 Rotkreuz  
Tel.: 041 799 79 79  
Fax: 041 799 79 40  
[www.coloplast.ch](http://www.coloplast.ch)  
E-Mail: [swissinfo@coloplast.com](mailto:swissinfo@coloplast.com)

# Vorbereitung und Reinigung beim Stoma-Versorgungswechsel


## Benötigte Materialien

- pH-neutrale Waschsubstanz
- Wasser
- Mullkompressen
- ein Spiegel (falls notwendig)
- eine Schere
- eine neue Versorgung, die passgenau für das Stoma vorbereitet wird
- ein Müllbeutel



Der Versorgungswechsel ist am besten stehend oder sitzend am Waschbecken durchzuführen.

Messen Sie regelmäßig den Umfang Ihres Stomas mit der speziell dafür vorgesehenen Messschablone.

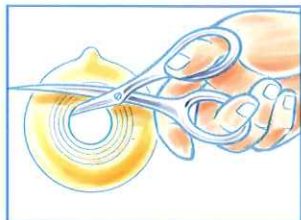

Vorbereitung einer neuen Versorgung: Schneiden Sie in die Mitte des Hautschutzes eine Öffnung in der Größe Ihres Stomaumfangs.



Entfernen Sie den benutzten Beutel; ziehen Sie dabei den Hautschutz von oben nach unten ab.



Entsorgen Sie die gebrauchte Versorgung in einen Müllbeutel.



Für eine erste, schnelle Reinigung nutzen Sie feuchte Kompressen. Mit pH-neutraler Waschsubstanz und Wasser reinigen Sie die stomaumgebende Haut.



Wischen Sie mit einer feuchten Komresse nach, bis alle Seifenreste entfernt sind. Dann mit einer Komresse abtrocknen, ohne dabei zu reiben.



Legen Sie eine neue Versorgung an, indem Sie mit einer Hand den Bauch nach oben straff ziehen und mit der anderen Hand von unten kommend die Versorgung fest andrücken.