

SenSura Flex

Die Anwendung der SenSura Flex Versorgung



1 Vorbereitung

Mit der Messschablone messen Sie die exakte Größe Ihres Stomas aus. Übertragen Sie die Umrisse des Stomas auf die Ausschneidehilfe der Basisplatte und schneiden Sie diese mit einer gebogenen Schere aus.

Vor dem Anlegen einer neuen Basis-

platte, reinigen Sie das Stoma und den umgebenden Bereich mit feuchten Kompressen und ph-neutraler Waschlotion. Entfernen Sie die Seife sorgfältig und trocknen Sie das Stoma und Umgebung mit Kompressen gut ab.



6 Druckfreies Anbringen

Wenn Sie einen druckempfindlichen Bauch haben, können Sie die transparente Haftzone mit beiden Händen untergreifen und den Beutel so ohne Druck auf den Bauch auszuüben, aufkleben.



2 Entfernen der Schutzfolie

Entfernen Sie zum Anlegen die Schutzfolie der Basisplatte an der blauen Abziehlasche.



7 Sichere Haftung

Drücken Sie den Hafring des Beutels noch einmal mit den Fingern fest an, damit der Beutel sicher haftet.



3 Anlegen der Basisplatte

Die Haut muss vor dem Anlegen der Basisplatte sauber und trocken sein. Legen Sie dann die Basisplatte am unteren Rand des Stomas an und drücken diese von außen nach innen fest.




8 Entfernen des Beutels

Um den Beutel zu entfernen, drücken Sie mit der einen Hand leicht auf die transparente Haftzone der Basisplatte und ziehen mit der anderen Hand den Beutel an der blauen Lasche langsam von der Basisplatte.



4 Reinigung der Basisplatte

Basisplatte und Haftzone müssen sauber und trocken sein, bevor ein neuer Beutel aufgelegt wird. Zur Reinigung sind Wasser und Toilettenpapier ausreichend. Entfernen Sie anschließend das Schutzpapier vom Hafring des Beutels.

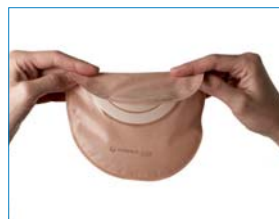

9 Entsorgen des Beutels

Zum Entsorgen des Beutels klappen Sie die obere Hälfte des Hafringes einfach auf die untere Hälfte, und verschließen so den Beutel. Anschließend können Sie den Beutel im Hausmüll entsorgen.



5 Anlegen des Beutels

Um den Beutel richtig und ohne Falten auf der Basisplatte zu fixieren, fassen Sie den Beutel mit beiden Händen, biegen ihn leicht nach hinten und setzen die Klebefläche ohne zu ziehen unten auf den blauen Orientierungsring der transparenten Haftzone der Basisplatte.



10 Entfernen der Basisplatte

Die Basisplatte entfernen Sie, indem Sie die Platte vorsichtig an der Abziehlasche von oben nach unten abziehen. Üben Sie dabei mit der anderen Hand Gegendruck auf die Haut aus.

SenSura

Coloplast

SenSura Flex

Die Anwendung des **Hide-away** Auslasses



1 Entleerung

Lösen Sie die Klettverschlüsse und entfalten Sie den Auslass. Das Entleeren in die Toilette können Sie mit den Fingern kontrollieren. Streichen Sie die letzten Ausscheidungsreste aus dem Beutel.



4 Verschließen des Auslasses

Falten Sie die untere Schaumstoffplatte in die Einkerbung der oberen, größeren Platte.



2 Reinigung des Auslasses

Nehmen Sie eine Kompresse und falten Sie diese um den Auslass. Streifen Sie die Kompresse mit leichtem Druck vom Körper weg über den Auslass.



5 Verschließen des Auslasses

Falten Sie den Auslass noch zweimal nach oben, bis Sie die Klettverschlussflügel auf die Veloursplatten drücken können.



3 Reinigung der Öffnung

Klappen Sie die untere Schaumstoffplatte nach hinten und reinigen Sie die Öffnung mit einer Kompresse.



6 Verbergen des Auslasses

Für mehr Diskretion können Sie den Auslass nun unter das Vlies schieben und an dem Klettverschluss fixieren.

Deutschland

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Tel.: 0 40 / 66 98 07-77
Fax: 0 40 / 66 98 07-48
www.coloplast.de
E-Mail: devks@coloplast.com

2 6 5 6 7 5 2 7 8
01 80 - COLOPLAST
Beratungs-Service für Deutschland,
0,06 € pro Anruf (aus d. dt. Festnetz)

Österreich

Coloplast G.m.b.H.
Thomas Klestil Platz 10
1030 Wien
Tel.: 01 / 7 07 57 51-0
Fax: 01 / 7 07 57 51 30
www.coloplast.at
E-Mail: atbestellung@coloplast.com

08 10 - 20 01 99
Beratungs-Service für Österreich,
zum Ortstarif

Schweiz

Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 0 41 799 79 79
Fax: 0 41 799 79 40
www.coloplast.ch
E-Mail: swissinfo@coloplast.com

041 - 799 79 79
Beratungs-Service für die Schweiz

SenSura

 **Coloplast**