


No-Tip – sicheres Arbeiten ohne Spitze

Mit der atraumatischen Spitze werden Verletzungen beim Vorschub und Rückzug weitestgehend vermieden.

Einfache Anwendung

Die Nitinol Dormia **No-Tip** kommt ohne Spitze aus. Die Legierung aus Nickel und Titan sorgt für gute Gleiteigenschaften während des Vorschubes und des Rückzuges. Das Körbchen ist nach dem Ausfahren aus dem Schaft am oberen Ende rund. Diese Formgebung ist eine wichtige Voraussetzung zur Vermeidung von Harnleiterverletzungen.

Das Angebot verschiedener Körbchengrößen ermöglicht, dass **die unterschiedlichsten** Steingrößen sicher fixiert werden können.

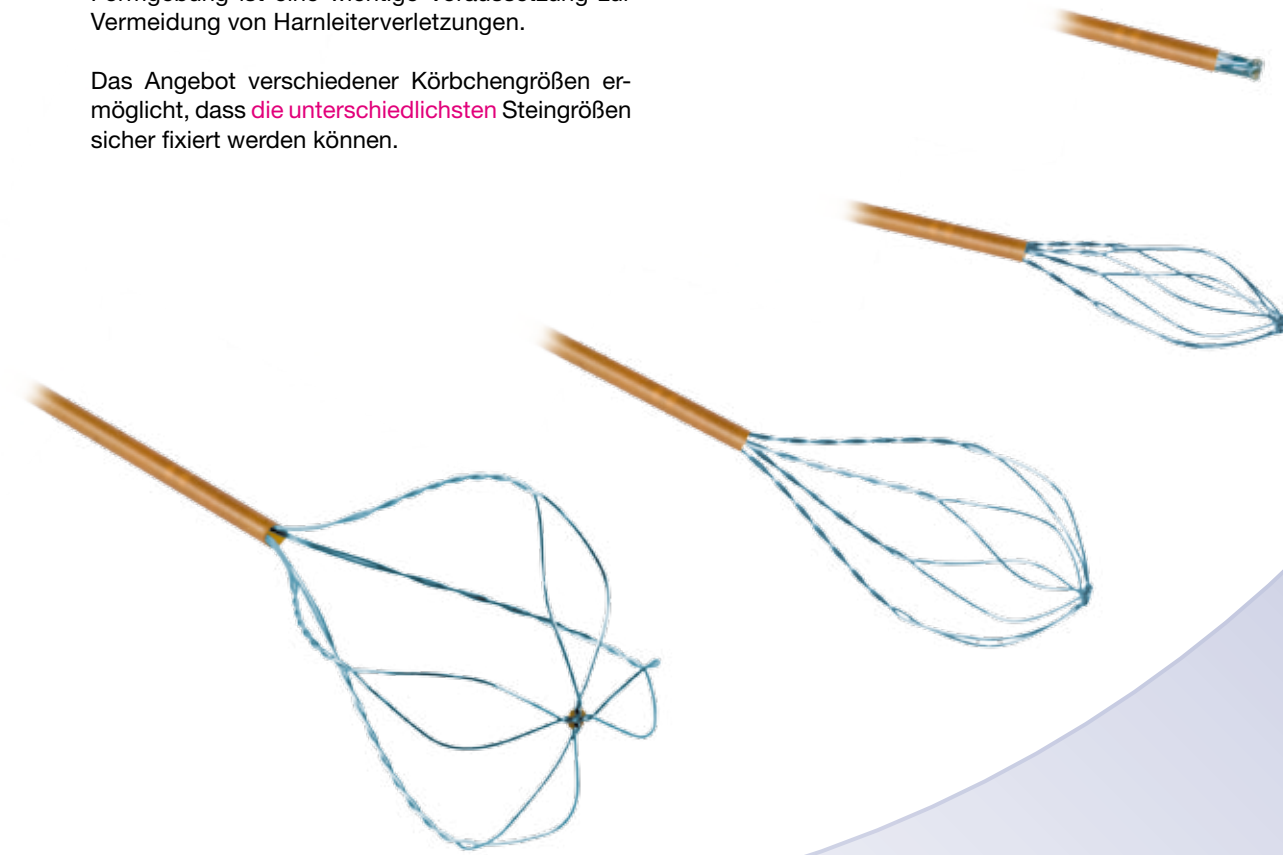

Flexible Steinfangkörbchen

Die **No-Tip** dringt sanft bis zum Objekt vor, öffnet sich, umschließt den Stein und befördert ihn sicher aus Niere und Harnleiter.

Bestellinformation

No-Tip

Dormia ohne Spitze aus Nitinol, zur Entfernung von Harnsteinen mit flexiblem Ureterorenoskop

Artikel-Nr.	Größe in CH	Länge in cm	Packungseinheit
EXN734	2,2	120	1

No-Tip

Dormia ohne Spitze aus Nitinol, zur Entfernung von Harnsteinen mit starrem oder semirigidem Ureteroskop

Artikel-Nr.	Größe in CH	Länge in cm	Packungseinheit
EXN434	3	90	1

N-Stone

Dormia mit Spitze aus Nitinol, zur Entfernung von Harnsteinen mit starrem oder semirigidem Ureteroskop

Artikel-Nr.	Größe in CH	Länge in cm	Packungseinheit
EXN624	2,5	90	1
EXN424	3	90	1
EXN224	4	90	1

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Tel. +49 40 669807-889
Fax +49 40 669807-48
www.coloplast.de
devks@coloplast.com



PORGES



Die Dormia **Nitinol Familie**
Harnleiter- und Nierensteine sicher und sanft entfernen


Urologieversorgung



Col.-Nr. 4906162/230N UP 019 Z. Coloplast, N.Stone und Dormia sind eingetragene Marken der Firma Coloplast A/S, © Coloplast A/S, DK-3050 Humlebaek, Dänemark.

Dormia Nitinol – Steinfänger mit hoher Formstabilität bei optimaler Flexibilität

Der ergonomisch geformte Griff sorgt für eine optimale Bewegungskontrolle. Er ist demontierbar und gestattet der Dormia den Rückzug durch das Endoskop, während das Körbchen eingelegt bleibt. Für die gute Gleitfähigkeit sorgt der innen und außen mit Teflon beschichtete Schaft.

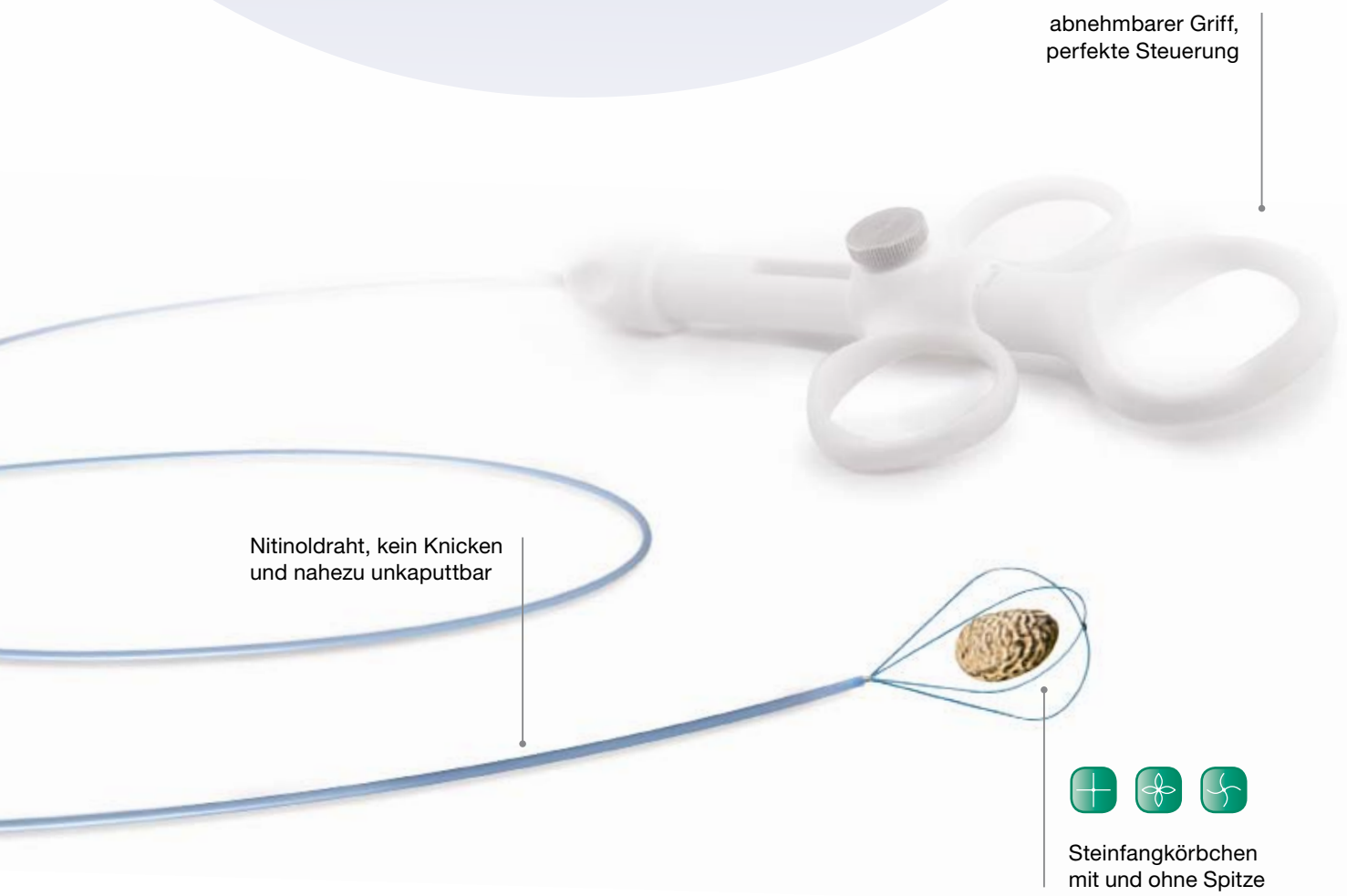

abnehmbarer Griff,
perfekte Steuerung

Nitinoldraht, kein Knicken
und nahezu unkaputtbar



Steinfangkörbchen
mit und ohne Spitze

Eigenschaften

→ Nitinol

Die Legierung aus Nickel und Titan. Hochwertiges Material schützt den Harnleiter und ermöglicht ein sanftes und sicheres Arbeiten.

→ Wendig

Die Nitinol-Familie folgt den technischen Entwicklungen in der Endourologie. Dünne Materialien erlauben eine sichere Steinpassage und -fixierung.

→ Flexibilität


Der Arbeitsschaft unterhalb des Körbchens ist sehr flexibel und folgt problemlos den Bewegungen eines flexiblen Ureterorenoskops.

→ Fixierung

Unterschiedlich gestaltete Körbchen erlauben die sichere Fixierung von Steinen in verschiedenen Größen.

Die Nitinol Familie – wendig, flexibel, mit und ohne Spitze. Sie folgen dem Stein bis in die Niere.

Unterschiedlich anatomische Gegebenheiten, vielfältige Steinformen oder Positionierungen des Steins oder einer Steinstraße erfordern ein flexibles Reagieren des Operators. Die Nitinol Familie ist mit ihren Auswahlmöglichkeiten an Stärken und Körbchen ein zuverlässiger Begleiter im urologischen Alltag.

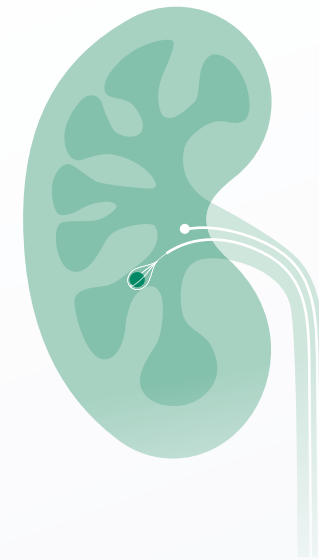


No-Tip CH2.2 besonders wendig und flexibel

Die **No-Tip** CH 2.2 zeichnet sich durch ihre besondere Biegsamkeit aus. Dadurch ist sie zur Anwendung im flexiblen Ureterorenoskop geeignet. Auch bei deutlicher Biegung bleibt die Funktionsfähigkeit der Dormia vollständig erhalten. Leichtes Einfangen des Steines im Harnleiter durch ein aus 4 Flachdrähten bestehendes Körbchen. Konnektor dient der Fixierung der Dormia an das Ureterorenoskop.

No-Tip CH3.0 sicheres Fassen der Steine

Zur Anwendung im rigiden oder semirigiden Ureterorenoskop geeignet. Bei Zertrümmerung des gefangenen Steines kein Entweichen der Steinpartikel in Nierenrichtung durch Körbchen aus 4 gedrehten Drähten.

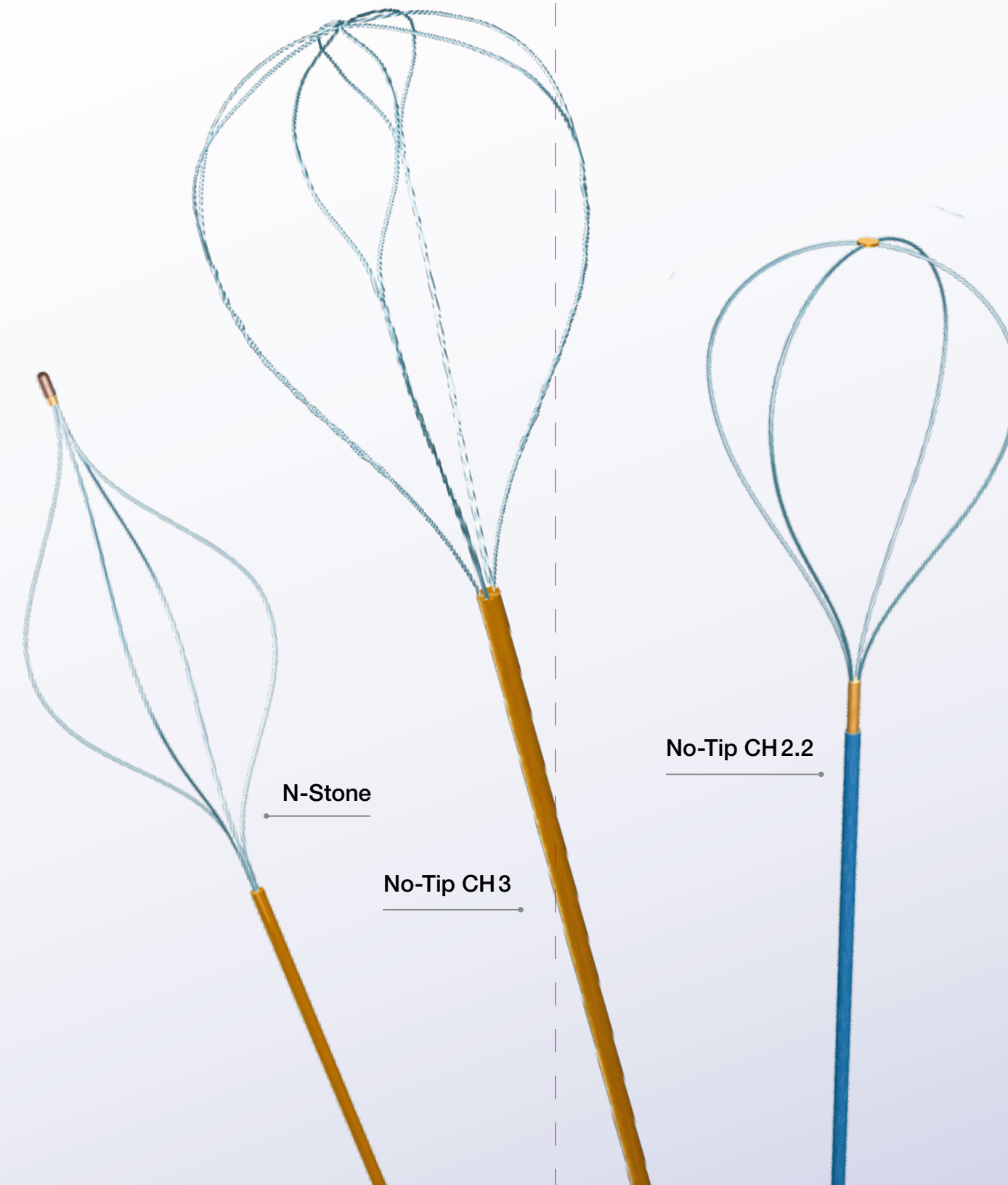

Flexibel

No-Tip CH2.2 für die Niere

Für die Entfernung von Steinen aus der Niere.

Sehr flexibel, kann in einem flexiblen Ureterorenoskop mit kleinem Arbeitsschaft problemlos verwendet werden.

Flexibles Ureterorenoskop

4 flache Drähte, 120 cm lang



Fest im Griff

No-Tip CH3 für die Ureter

Für die Entfernung von Steinen aus dem Harnleiter.

Das Körbchen verhindert bei der Zertrümmerung des Nierensteins, das Wandern der Partikel in die Niere.

Semirigides, rigides Ureterorenoskop

4 gedrehte Drähte, 90 cm lang



Fest in Form

N-Stone für die Ureter

Für die Entfernung von Steinen aus dem Harnleiter.

Sicheres Erfassen und ausgezeichnete Fixierung des Steins, hohe Aufstellkraft.

Semirigides, rigides Ureterorenoskop

4 helikale Drähte, 90 cm lang