


SenSura® Mio Konkav

Handhabung der 2-teiligen Versorgung

Bitte bereiten Sie Ihre Stomaversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung vor.

Tipp: Wir empfehlen, das Produkt wenn möglich im Stehen anzulegen.

Aufbau der Basisplatte

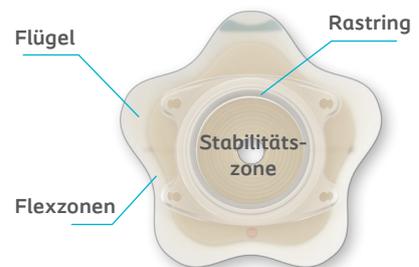

Schritt 1: Abziehfolie entfernen

Dieser erste Schritt ist wichtig, damit Sie die Schutzfolie einfach abziehen können. Drücken Sie dafür die Basisplatte in der Mitte einmal ein, so dass sich die Flügel der Platte umstülpen. Ziehen Sie dann die Abziehfolie von oben nach unten ab. Die Basisplatte wird automatisch wieder in ihre ursprüngliche Form zurückgehen.




Schritt 2: Anlegen der Basisplatte

Platzieren Sie die Basisplatte um Ihr Stoma und richten Sie die Platte um das Stoma aus. Drücken Sie den Bereich innerhalb des Rastringes an die Haut an. Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anliegen.



Anschließend können Sie durch das "Flip-in-Form-System" die fünf Flügel der Basisplatte umklappen.

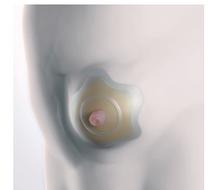

Schritt 3: Fixieren der Basisplatte

Streichen Sie die Basisplatte kreisförmig zwischen Rastring und Öffnung fest an die Haut an, um eine sichere Haftung zwischen Basisplatte und Haut um das Stoma zu erreichen.

Drücken Sie dann die Ausbuchtungen zwischen den Flügeln sorgfältig an. Anschließend fixieren Sie die Flügel. Bringen Sie dann den Beutel wie gewohnt auf der Basisplatte an.



Die Anleitung zum Anlegen der SenSura® Mio Konkav Stomaversorgung steht Ihnen auch als Animation zur Verfügung. Geben Sie folgenden Link in Ihren Browser ein:

de.coloplast.at/konkav1


SenSura[®] Mio Konkav

Handhabung der 1-teiligen Versorgung

Bitte bereiten Sie Ihre Stomaversorgung gemäß der Gebrauchsanweisung vor.


Tipp: Wir empfehlen, das Produkt wenn möglich im Stehen anzulegen.

Aufbau der 1-teiligen Stomaplatte

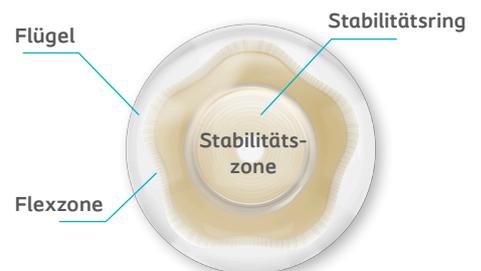

Schritt 1: Abziehfolie entfernen

Dieser erste Schritt ist wichtig, damit Sie die Schutzfolie einfach abziehen können. Drücken Sie dafür die Stomaplatte in der Mitte einmal ein, so dass sich die Flügel der Versorgung umstülpen. Ziehen Sie dann die Abziehfolie von oben nach unten ab. Die Stomaplatte wird automatisch wieder in ihre ursprüngliche Form zurückgehen.

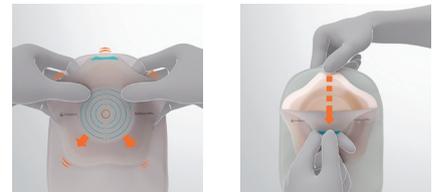


Schritt 2: Anlegen der Versorgung

Die Stomaplatte hat einen Stabilitätsring, dieser hilft Ihnen auch beim sicheren Platzieren der Platte, insbesondere, wenn Sie Ihr Stoma nicht einsehen können. Platzieren Sie die Stomaplatte mit dem Stabilitätsring um Ihr Stoma und richten sie die Platte um das Stoma aus. Ertasten Sie den Stabilitätsring und drücken Sie den Bereich innerhalb des Stabilitätsringes an die Haut an. Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anliegen.




Durch das "Flip-in-Form-System" können Sie die Flügel der Stomaplatte anschließend umklappen.

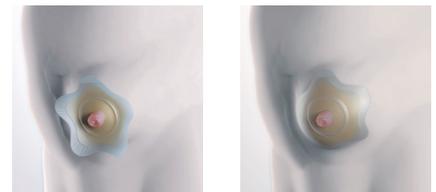

Schritt 3: Fixieren der Stomaplatte

Ertasten Sie den Stabilitätsring im inneren Bereich der Stomaplatte. Streichen Sie zuerst die Platte kreisförmig zwischen Stabilitätsring und Öffnung an die Haut an, um eine sichere Haftung zwischen Hautschutz und Haut um das Stoma zu erreichen.

Drücken Sie dann die Ausbuchtungen zwischen den Flügeln sorgfältig an. Anschließend fixieren Sie die Flügel.

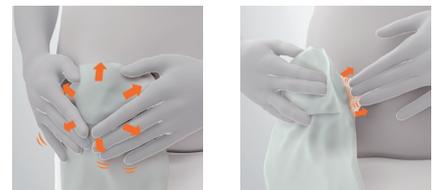

Die Anleitung zum Anlegen der SenSura[®] Mio Konkav Stomaversorgung steht Ihnen auch als Animation zur Verfügung. Geben Sie folgenden Link in Ihren Browser ein:

Für die Kolostomieversorgung: de.coloplast.at/konkav2

Für die Ileostomieversorgung: de.coloplast.at/konkav3

Für die Urostomieversorgung: de.coloplast.at/konkav4