

Peristeen®

Mehr Kontrolle und Sicherheit im Darmmanagement.

Peristeen® Light erleichtert den Alltag bei Darmfunktionsstörungen – ergänzt durch den **Peristeen® Analtampon** für zusätzlichen Schutz.



Peristeen® Light



Mehr als 40%

aller Menschen weltweit leiden unter Darmfunktionsstörungen. Sowohl die Fachpersonen als auch die Anwender:innen wünschen sich eine einfache Lösung.¹

Peristeen® Light ist ein leicht und diskret anzuwendendes Irrigationssystem mit geringer Wassermenge (175 ml bzw. 250 ml) für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Es kann chronische Darmbeschwerden wie Verstopfung oder Stuhlinkontinenz lindern und lässt sich mit wenigen einfachen Schritten in den Alltag integrieren.

Dank seiner gleichmässigen Form lässt sich der Wasserbehälter leicht in der Hand halten und zusammendrücken. Er fasst 175 ml bzw. 250 ml Wasser und kann 30-mal verwendet werden. Optional kann er mit einem Schlauch zur Verlängerung verbunden werden, welcher ebenfalls 30-mal angewendet werden kann.

Die Produktvorteile

Einmal-Konuskatheter mit zwei seitlichen Wasseröffnungen und einer abgerundeten Spitze für möglichst sanftes Einführen.

Grosszügige Katheter-Basis stellt sicher, dass der Wasserbehälter nicht mit Ausscheidungen in Berührung kommt.

Die hydrophile Beschichtung wird nach 2 Sekunden unter Wasser aktiviert.

Der Wasserbehälter liegt durch seine Form gut in der Hand und lässt sich leicht zusammendrücken.

Überstehender Deckel sorgt für ein einfaches Öffnen und Schliessen.

Das Einwegventil verhindert einen Rückfluss möglicher Ausscheidungen in den Behälter.

Auch mit Verlängerungsschlauch erhältlich.

Für die Anwendung von Peristeen® Light benötigen Sie ausschliesslich Leitungs- oder stilles Mineralwasser ohne weitere Zusätze. Dadurch sinkt das Risiko von Irritationen der Darmschleimhaut, auch bei einer langfristigen Anwendung.

1 Sperber, A. D. et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. 2021;160:99-114.

Weitere Vorteile des Peristeen® Light auf einen Blick



Klein & diskret: Systeme für die Irrigation mit geringer Spülmenge sind oft recht gross. Das neue Peristeen® Light fasst lediglich 175 ml bzw. 250 ml.

Für zuhause
und unterwegs
geeignet!



Einfach & unkompliziert: Die Verwendung des Peristeen® Light erfordert keine lange Vorbereitung. Zwei einfache Handgriffe – und das Irrigationssystem ist einsatzbereit.



Handlich & flexibel: Der Wasserbehälter ist so geformt, dass er immer gut in Ihrer Hand liegt und sich leicht zusammendrücken lässt. Wechseln Sie ihn nach 30 Anwendungen aus.

Kostenübernahme des Peristeen® Light

Das Angebot des Peristeen® Light Produktmusters richtet sich ausschliesslich an Anwender:innen, für die die Anwendung eines Systems zur analen Irrigation medizinisch indiziert ist. Für eine Kostenerstattung bei Ihrer Krankenkasse ist zudem eine Verordnung erforderlich.

Peristeen® Light und Peristeen® Plus: Das starke Duo für die transanale Irrigation (TAI)

Je nach Symptomen und deren Stärke stehen Ihnen ab sofort sowohl ein hoch- als auch ein niedrigvolumiges Irrigationssystem zur Verfügung. So können Sie noch genauer auf die Bedürfnisse Ihrer Patient:innen eingehen und ihnen individuelle Therapieoptionen bieten.

Tipp: Peristeen® Light kann auch als Einstiegsprodukt zum behutsamen Heranführen an die transanale Irrigation bei Patient:innen mit Ängsten und/oder Kindern genutzt werden.



Aktiv leben mit dem Peristeen® Analtampon

Der Peristeen® Analtampon ist ein kleines, sanftes und diskretes Hilfsmittel für maximale Bewegungsfreiheit und Lebensfreude. Er wurde entwickelt, um den unkontrollierten Verlust von festem Stuhl zu verhindern und bietet Frauen und Männern mit Darmschwäche zusätzliche Sicherheit und Schutz für ein aktives Leben.


Er besteht aus einem weichen, hautverträglichen Schaumstoff, der von einer wasserlöslichen Schutzfolie umgeben ist. Diese Folie komprimiert den Schaumstoff auf ein sehr geringes Mass, sodass der Analtampon in Kombination mit dem beiliegenden Gleitgel einfach und angenehm einzuführen ist. Die Schutzfolie löst sich nach dem Einführen rückstandslos auf.

Der Peristeen® Analtampon hält festen Stuhl bis zu zwölf Stunden lang sicher zurück. Er ist in zwei Größen erhältlich, somit ist er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet.

Einsatzgebiete

Der Peristeen® Analtampon ist ein einfaches, sicheres und diskretes Hilfsmittel bei Darmschwäche mit vielen Vorteilen: z. B. können Geruchsentstehung und Hautirritationen vermieden werden, das Risiko von Dekubitusentstehung und Harnwegsinfektionen können reduziert sowie die Mobilität verbessert werden. Der Peristeen® Analtampon ermöglicht Ihnen insbesondere in Kombination mit Peristeen® Light eine optimale Versorgung mit zusätzlichem Schutz – so können Sie Ihr Leben wieder unbeschwert genießen.

Die Produktmerkmale

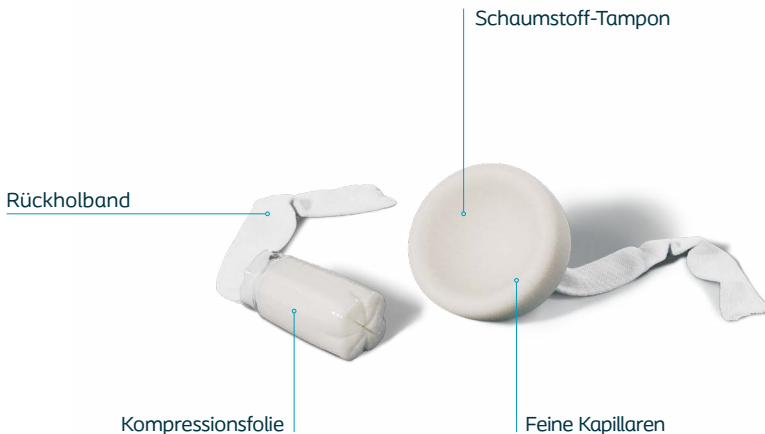

Studienergebnisse




Um das hohe Qualitätsniveau unserer Produkte zu steigern, werden sie ständig geprüft und getestet. Unser Anspruch ist es, Ihnen mit Hilfsmitteln die Sicherheit zu geben, die Sie für die aktive Teilnahme am Leben benötigen. Das nachfolgend aufgeführte Studienergebnis² zum Peristeen® Analtampon zeigt, dass wir unsere Ziele erreichen konnten.

Fast vollständige Kontinenz

72 % der Anwender:innen hatten maximal einen unfreiwilligen Stuhlverlust innerhalb von 18 Anwendungstagen.

0 Stuhlverluste 54%

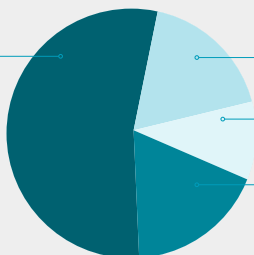

1 Stuhlverlust 18%

2 Stuhlverluste 10%

3 - 5 Stuhlverluste 18%

Wiedererlangen von Sicherheit & Freiheit

80%

der Anwender:innen vermittelte der Peristeen Analtampon das Gefühl von Sicherheit.

53%

der Anwender:innen vermittelte der Peristeen Analtampon das Gefühl von Freiheit.

Zufriedenheit der Anwender:innen

87%

der Anwender:innen werden den Peristeen Analtampon weiterverwenden.

97%

der Anwender:innen werden den Peristeen Analtampon Dritten weiterempfehlen.

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	MiGel	Pharmacode
Peristeen® Light Set 175 ml	291710	1 Wasserbehälter 175 ml, 30 Katheter	15.17.01.00.1	1128049
Peristeen® Light Konuskatheter	291720	15 Konuskatheter	15.17.01.00.1	1128050
Peristeen® Light Set 250 ml	291760	1 Wasserbehälter 250 ml, 30 Katheter	15.17.01.00.1	1132114
Peristeen® Light Set 250 ml mit Schlauch	291810	1 Wasserbehälter 250 ml, 30 Katheter, 1 Schlauch	15.17.01.00.1	1132115
Peristeen® Light Schlauch	291850	1 Verlängerungsschlauch	15.17.01.00.1	1132116
Peristeen® Analtampon klein	014500	20 Analtampons + 1 Tube Gel	15.40.01.00.1	2930080
Peristeen® Analtampon gross	014510	20 Analtampons + 1 Tube Gel	15.40.01.00.1	2930097

Sind Sie an Peristeen® Produkten interessiert? Scannen Sie den QR-Code, um sich ein kostenfreies Muster anzufordern:



de.coloplast.ch/peristeen-light

Sind Sie eine medizinische Fachperson? Erfahren Sie mehr über Peristeen® für Ihre Patient:innen unter:



de.coloplast.ch/peristeenlight-hcp



Mehr Unterstützung

Hotline: 0800 777 070

E-Mail: consumercare@coloplast.com

Montag bis Freitag von 9:00 - 15:30 Uhr

Mehr Tipps und Tricks

Besuchen Sie uns auch auf www.coloplast.ch

PM-36273 / 220NCMS443D

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz, Tel. +41 79979-79 / Fax + 41 79979-40, swissinfo@coloplast.com, www.coloplast.ch

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2025-05. All rights reserved Coloplast A/S