


Votre changement de dispositif stomial

Préparation et nettoyage

Matériel requis

- › Eau
- › Compresses non tissées
- › un miroir (si nécessaire)
- › des ciseaux
- › un nouveau dispositif préparé aux dimensions exactes
- › un sachet poubelle
- › un crayon pour marquer la surface à découper

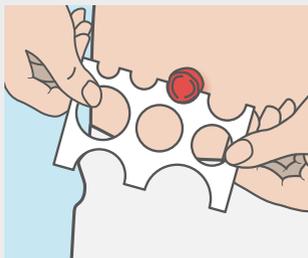

Changer le dispositif de préférence en position debout ou assis à côté du lavabo.

En outre :

Mesurez régulièrement la circonférence de votre stomie avec les gabarits prévus à cet effet.

Etape 1



Préparation d'un nouveau dispositif
Découpez une ouverture du même diamètre que votre stomie au milieu de la plaque de base.

Etape 2



Enlevez l'ancien dispositif : Tirez pour cela du haut vers le bas. Le spray de retrait d'adhésif Brava® permet un décollage en douceur pour les peaux sensibles.

Etape 3




Débarrassez-vous de l'ancien dispositif dans un sachet poubelle.

Etape 4



Pour un premier nettoyage rapide, utilisez des compresses non tissées humides pour nettoyer la peau péristomiale. En cas d'urostomie, nettoyez en partant de la stomie vers l'extérieur, et dans le sens contraire en cas de colostomie ou d'iléostomie.

Etape 5

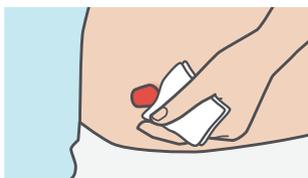

Nettoyez encore une fois avec une compresse non tissée humide ou un autre tissu de protection cutanée. Sécher ensuite au moyen d'une compresse, mais sans frotter.

Etape 6



Enlevez le film protecteur de la protection cutanée et posez-la en étirant d'une main le ventre vers le haut et en plaquant le dispositif de l'autre main fermement du bas vers le haut.

Au lieu de compresses non tissées, vous pouvez également utiliser les lingettes douces de Brava®.

Votre changement de dispositif stomial

Protection assurée avec Brava®

Matériels de premier ordre

› Anneau protecteur cutané modelable Brava® Plus ou pâte Brava®

Application pour les inégalités cutanées périostomiales telle que les plis et les cicatrices ou pour les stomies difficiles à appareiller.

› Ceinture Brava®

Maintient le dispositif stomial discrètement en place et confère une sûreté additionnelle.

› Bandage stomial Brava®

Peut prévenir les hernies parastomiales ou assurer un soutien additionnel en présence de hernies parastomiales.

Procédure alternative avec l'anneau protecteur cutané modelable Brava® Plus

Etape 1



Disposez l'anneau protecteur cutané autour de la stomie et appliquez-le au moyen d'une légère pression.

Etape 2



Posez un nouveau dispositif et plaquez-le fermement du plat de la main.

Etape 3



Faites passer la ceinture derrière le dos et ramenez-la vers l'avant sur la stomie. Saisissez une extrémité dans chaque main et fixez les deux extrémités sur la plaque de base. Vérifiez que la ceinture n'est pas entortillée.

Procédure alternative avec la pâte Brava®

Etape 1



Appliquez la pâte sur la surface cutanée périostomiale: vous pouvez la modeler avec les doigts humides de sorte à combler les renforcements cutanés (directement près de la stomie ou dans les plis latéraux).

Etape 2



Posez un nouveau dispositif et plaquez-le fermement du plat de la main.

Etape 3



Faites passer la ceinture derrière le dos et ramenez-la vers l'avant sur la stomie. Saisissez une extrémité dans chaque main et fixez les deux extrémités sur la plaque de base. Vérifiez que la ceinture n'est pas entortillée.