



reddot award 2019
winner

Für kleine Kämpfer

SenSura® Mio Baby
und SenSura® Mio Kids

SenSura® Mio



»Für Frühchen ist es entscheidend, soviel Ruhe wie möglich zu erhalten. Eine Versorgung, die die Handhabung minimiert, wäre ein Meilenstein in der Stomaversorgung.«

June, pädiatrische Stomatherapeutin

Die typischen Herausforderungen bei Frühchen und Neugeborenen

Körper	Sehr klein, verletzlich, wenig Platz für die Stomaversorgung
Haut	Verletzlich, nicht vollständig entwickelt
Stoma	Sehr klein, unterschiedliche Arten und Platzierungen
Ausscheidung	Aggressiv, unterschiedliche Volumina
Handhabung	Zeitaufwändig, kraftraubend und störend für den Säugling
Umfeld	Äusserst schwierige Bedingungen (Inkubator)

Häufige Versorgungswechsel sind für Säuglinge belastend. Ruhestörungen können insbesondere bei Frühgeborenen das Wachstum negativ beeinflussen.^{1,2}

Anwendungstipps

Basisplatten von Stomaversorgungen benötigen Druck, um auf der Haut zu haften und ganzheitlich abzudichten. Daher ist selbst bei empfindlicher Babyhaut sanfter Druck notwendig, damit die Basisplatte sicher auf der Haut sitzt.

Drei Schritte zum besten Ergebnis:



Schritt 1

- › Die Babyhaut muss sauber und trocken sein.



Schritt 2

- › Schneiden Sie die Basisplatte auf die genaue Grösse und Form des Stomas/der Stomata zu.



Schritt 3


- › Richten Sie die Basisplatte vorsichtig um das Stoma/die Stomata aus, legen Sie sie anschliessend auf die Haut und üben danach vorsichtig Druck auf die gesamte Basisplatte rund um das Stoma/die Stomata aus, so dass sie fest sitzt.



Die Tragedauer ist kürzer als erwartet? Probieren Sie Folgendes:

- › Stellen Sie sicher, dass die Aussparung genau der Grösse des Stomas/der Stomata entspricht, ohne es dabei zu berühren.
- › Schneiden Sie die Basisplatte im 90°-Winkel zu. Der Schnitt sollte nicht diagonal verlaufen.
- › Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Basisplatte aus, damit Sie eine sofortige Haftung der Basisplatte erreichen.
- › Sorgen Sie für eine saubere Haut. Die Haftung der Basisplatte wird durch ölige Ausscheidungsrückstände auf der Haut beeinträchtigt.

Korrekt

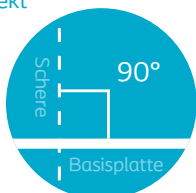

Anfällig für
Leckagen



Unser Anspruch:
Maximale Tragedauer – minimale Ruhestörung

SenSura® Mio Baby – die besondere Lösung für Frühgeborene und Säuglinge

SenSura® Mio Baby ist eine zweiteilige Versorgung, die speziell für Frühgeborene und Säuglinge entwickelt wurde. Die vielen durchdachten Details von SenSura® Mio Baby berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse von Neugeborenen und ermöglichen so eine vereinfachte und zeitsparendere Versorgung.

Die SenSura® Mio Baby Basisplatte besteht aus einem Hautschutzmaterial, das **eine lange Tragedauer** ermöglicht. So werden Versorgungswechsel reduziert und die empfindliche Haut der kleinen Kämpfer geschont.

Ein besonderes Merkmal des SenSura® Mio Baby Beutels ist **das Stuhl-Rückführungssystem**. Es besteht aus einem für enterale Spritzen passenden Auslass und einem Applikationsfenster zum einfachen Zuführen des Stuhls.

Nutzen für Fachkräfte für eine Erleichterung der täglichen Arbeit

- › Reduziert den Zeitaufwand bei der Versorgung von Säuglingen
- › Minimiert Störungen des Säuglings
- › Erleichtert das individuelle Anpassen der Versorgung (kein Starterloch in der Basisplatte)
- › Bietet Vorrichtung, um das Stoma für die Stuhl-Rückführung zu erreichen
- › Steriler Beutel




Die besonderen Merkmale für unsere Kleinsten



Hautfreundliche Basisplatte

Konzipiert, um Stomata von Säuglingen und Kindern optimal zu versorgen und eine lange Tragezeit zu gewährleisten. Unterstützt eine gute pH-Balance.

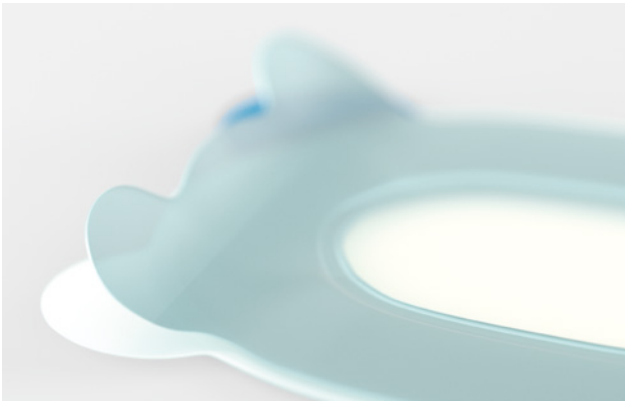

Weiche Klebekopplung

Für eine einfache Anwendung und möglichst druckarmes Anbringen des Beutels auf der Basisplatte.



Applikationsfenster

Vereinfacht die Stuhlrückführung und den Zugang zum Stoma – für mehr Ruhe des Babys.



Transparente Folie

Ermöglicht die Sicht auf das oder die Stomata, ohne dass der Beutel entfernt und dadurch das Baby gestört werden muss.



Weicher, bedienfreundlicher Auslass

Weiches Material, das sanft zur empfindlichen Babyhaut ist. Der Auslass ermöglicht die Verwendung enteraler Spritzen zur Entnahme von Beutelinhalt.

SenSura[®] Mio Kids

»Ein Beutel, der so gut sitzt, dass mein Sohn tun kann, was er will – das bedeutet mir alles.«

Mark, Henrys Vater



Die typischen Herausforderungen bei Kleinkindern

Bewegung

Meist neugierig und fast immer in Bewegung

Körper

Kleine, runde Bäuche

Haut

Empfindlich und nicht vollständig entwickelt

Damit Kinder wie Kinder sein können

Sobald Kinder das Krabbelalter erreicht haben, sind sie fast immer in Bewegung. Dazu benötigen sie eine Stomaversorgung, die das auch mitmacht. Für die kleinen Patienten zwischen 6 Monaten und 4 Jahren gibt es jetzt mit SenSura® Mio Kids ein passendes Sortiment mit 1-teiligen und 2-teiligen Versorgungsprodukten.


SenSura® Mio Kids Sortiment 1-teilige Versorgung

Erhältlich als Ausstreifbeutel und als Urostomiebeutel.



SenSura® Mio Kids Sortiment 2-teilige Versorgung

Erhältlich als Ausstreifbeutel in zwei verschiedenen Größen.

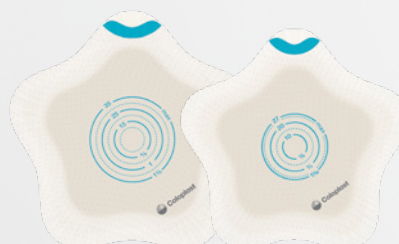

**Unser Anspruch:
Maximale Bewegungsfreiheit**



SenSura® Mio Kids – die spezielle Lösung für Kinder


SenSura® Mio Kids ist mit allen bewährten Details der SenSura® Mio Produktfamilie ausgestattet, die zusätzlich auf die Bedürfnisse der kleinen Patienten optimiert wurden. So bietet SenSura® Mio Kids ein hohes Anpassungsvermögen an kindliche Körperformen und Bewegungen.

Die besonderen Details



Sternförmiger, elastischer Hautschutz

- › Der sternförmige Hautschutz umarmt mit seinen Flügeln die kleinen runden Kinderbäuche und sorgt für einen sicheren Sitz.
- › Die Form ermöglicht eine flexible Platzierung des Hautschutzes und kann das Zuschneiden von Aussparungen ersparen.
- › Das elastische Hautschutzmaterial ist sanft zur empfindlichen Haut des Kindes.
- › Die Basisplatten haben kein Starterloch, was eine freie Positionierung z. B. bei multiplen Stomata möglich macht.

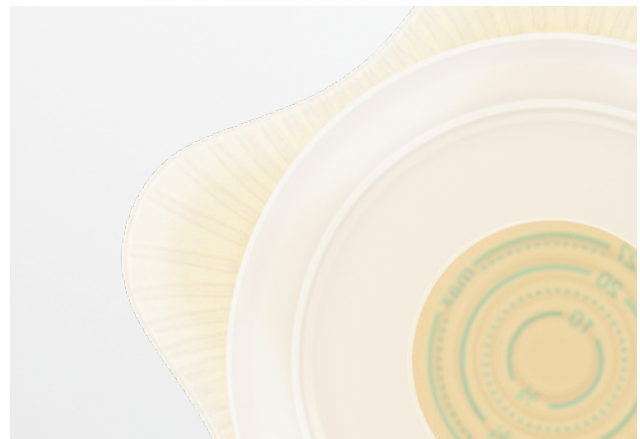

Flexzonen

- › Die Flexzonen befinden sich am Rand der Basisplatte.
- › Sie erhöhen die Elastizität der Versorgung und bieten so eine hohe Anpassung an die Stomaumgebung.
- › Die Flexzonen unterstützen die vielen Bewegungen der Kinder.




BodyFit Technologie

- › Die BodyFit Technologie sorgt für eine gute Anpassung der Stomaversorgung an den Körper, unabhängig von der Körperform.
- › Folgt den individuellen Körperformen und Bewegungen der Kinder und ermöglicht so einen sicheren Sitz.



Lichtgrauer Textilstoff

- › Der lichtgraue und hautfreundliche Textilstoff sorgt für ein neutrales, nicht medizinisches Erscheinungsbild.
- › Die neutrale Farbe ist diskret, auch unter dünner oder weisser Kleidung.
- › Wasserabweisendes Material

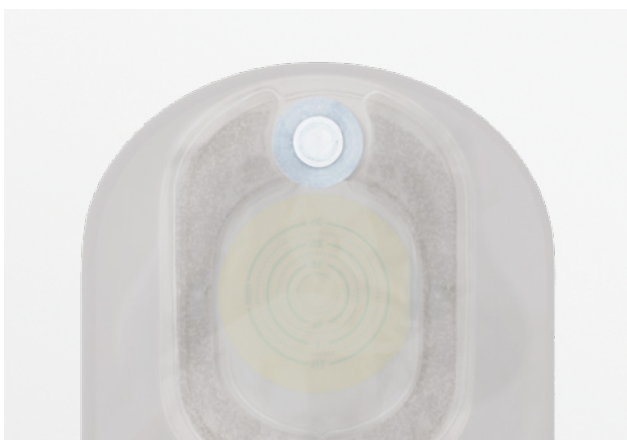

Einzigartiger Ringfilter

- › Die spezielle Form des ringförmigen Vorfilters verzögert ein Blockieren des Filters.
- › Der Ringfilter vermindert das Aufblähen des Beutels.



Flexible Klebekopplung

- › Sanftes Aufbringen auch bei empfindlichen Bereichen und weichen Bäuchen.
- › Durch einfache Streichbewegungen lässt sich die Basisplatte auf dem Beutel befestigen.
- › Angenehm zu tragen und ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
- › Die Klebekopplung ist äusserst flach, flexibel und trägt kaum auf.



Zusatzprodukte

Brava® Pflasterentferner für SenSura® Mio Baby

Der Pflasterentferner auf Öl-Basis ist für die hohen Ansprüche der Haut von Frühchen und Neugeborenen geeignet.

Er wurde speziell für das sanfte Entfernen der SenSura® Mio Baby Basisplatte entwickelt.

Erfahren Sie mehr über SenSura® Mio Baby und Kids unter:
de.coloplast.ch/baby-kids

1 Levy et al., Impact of Hands-On Care on Infant Sleep in the Neonatal Intensive Care Unit, *Pediatr Pulmonol*, 2017.

2 Zeiner et al., Preterm Infants Behavior and Skin Conductance Responses to Nurse Handling in NICU, *J Matern Fetal Neonatal Med*, August 2016.

Bestellinformationen

SenSura® Mio Baby

2-teilig Basisplatte, ohne Starterloch, sterile Oberflächenbehandlung



Artikel-Nr.	Stomagrösse	St./VE	Pharmacode
187050	0 – 40 mm	5	7452656

2-teiliger Ausstreifbeutel, mit weichem Auslass und Applikationsfenster, steril



Artikel-Nr.	Farbe	Volumen	St./VE	Pharmacode
187000	transparent	160 ml	10	7452633

Brava® Pflasterentferner für SenSura® Mio Baby



Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	St./VE	Pharmacode
120140	3 ml	Sachet	30	7452627

SenSura® Mio Kids

1-teilig Ausstreifbeutel, ohne Starterloch



Artikel-Nr.	Farbe	Volumen	Beutelgrösse	Stomagrösse	St./VE	Pharmacode
187100	lichtgrau/opaque	180 ml	midi	0 – 35 mm	10	7452662

1-teilig Urostomiebeutel



Artikel-Nr.	Farbe	Volumen	Beutelgrösse	Stomagrösse	St./VE	Pharmacode
187120	transparent	200 ml	midi	10 – 35 mm	10	7452679

2-teilig Basisplatten, ohne Starterloch



Artikel-Nr.	Hafttring	Stomagrösse	St./VE	Pharmacode
187350	● 27 mm	0 – 27 mm	5	7452722
187470	● 35 mm	0 – 35 mm	5	7452739

2-teilig Ausstreifbeutel



Artikel-Nr.	Farbe	Volumen	Hafttring	Beutelgrösse	St./VE	Pharmacode
187200	lichtgrau/opaque	85 ml	● 27 mm	mini	10	7452685
187220	lichtgrau/opaque	200 ml	● 27 mm	midi	10	7452691
187240	lichtgrau/opaque	200 ml	● 35 mm	midi	10	7452716

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.