



reddot award 2019
winner

Pour les petits
combattants

*SenSura[®] Mio Baby
et SenSura[®] Mio Kids*

SenSura[®] Mio



«Les prématurés demandent le plus grand calme possible. Des soins qui réduiraient les manipulations autant que possible constitueraient un jalon dans le traitement des stomies.»

June, stomathérapeute pédiatrique

Les défis typiques chez les prématurés et les nouveau-nés

Corps	très menu, vulnérable
Peau	vulnérable, développement incomplet
Stomie	très petite, différents types et emplacements
Selles	agressives, volumes divers
Manipulation	fastidieuse; demande du temps et dérange les petits patients
Environnement	extrêmement difficile (couveuse)

Les changements fréquents de dispositif sont pesants pour les nourrissons. Les dérangements peuvent nuire à la croissance des prématurés en particulier.^{1,2}

Conseils pratiques

Les plaques de base des dispositifs stomiaux requièrent une pression pour adhérer à la peau et rester bien étanches. Il faut donc exercer une légère pression même sur la sensible peau de bébé pour que la plaque conserve une bonne assise.

Trois étapes pour un résultat concluant :



Etape 1

- › La peau de bébé doit être propre et sèche.



Etape 2

- › Découpez la plaque de base à la dimension et à la forme exactes de la stomie ou des stomies.



Etape 3


- › Disposez la plaque de base avec précaution autour de la stomie/ des stomies, posez-la ensuite sur la peau, puis exercez une légère pression sur l'ensemble de la plaque autour de la stomie/ des stomies jusqu'à ce qu'elle tienne fermement.

Elle tient moins longtemps que prévu ?

Essayez ceci :

- › Faites en sorte que l'orifice ait exactement la taille de la stomie/des stomies sans pour autant être en contact.
- › Découpez la plaque de base à un angle de 90°. La coupe ne doit pas s'effectuer en diagonale.
- › Exercez une légère pression sur l'ensemble de la plaque de base pour qu'elle adhère immédiatement.
- › Nettoyez bien la peau. Des résidus huileux sur la peau provenant de sécrétions nuisent à l'adhérence.

Correct

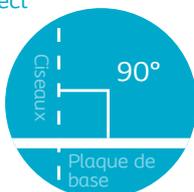

Susceptible de fuir



Notre intention affirmée :
Durée de port maximale – dérangement minimal

SenSura[®] Mio Baby – la solution spéciale pour prématurés et nourrissons

SenSura[®] Mio Baby est un dispositif deux pièces spécialement conçu pour les prématurés et les nourrissons. Les nombreux détails bien réfléchis de SenSura[®] Mio Baby prennent en compte les besoins spécifiques des nouveau-nés et permettent de dispenser des soins plus simplement et rapidement.

La plaque de base SenSura[®] Mio Baby se compose d'un matériel doux pour la peau qui permet un port **de longue durée**. Les changements de dispositifs sont ainsi moins nombreux et la délicate peau des petits combattants est ainsi préservée.

La poche SenSura[®] Mio Baby a pour caractéristique particulière le système **de réinstillation des selles**. Elle comporte une sortie adaptée aux seringues entérales et une fenêtre d'application facilitant la réinstillation des selles.

Facilite le travail quotidien des spécialistes

- › Réduit le temps requis pour les soins à dispenser aux nourrissons
- › Stresse moins le nourrisson
- › Facilite l'ajustement individuel du dispositif (pas de perforation initiale dans la plaque de base)
- › Est munie d'un système donnant accès à la stomie pour la réinstillation des selles
- › Poche stérile



Les principales caractéristiques pour nos tout-petits



Plaque de base dermo-compatible

Conçue pour un soin optimal des stomies chez les nourrissons comme les enfants et pour garantir une durée de port prolongée. Favorise un bon équilibre pH.



Adhésion aisée

Pour la simplicité d'usage et une pression légère seulement à l'application de la poche sur la plaque de base.



Fenêtre d'application

Facilite la réinstillation des selles et l'accès à la stomie – pour la plus grande tranquillité du bébé.



Feuille transparente

Laisse visible la stomie ou les stomies, sans besoin d'enlever la poche et de stresser le bébé.



Robinet souple maniable

Matériel souple doux pour la sensible peau du bébé. La sortie permet l'utilisation de seringues entérales pour l'extraction du contenu de la poche.

«Une poche à ce point bien ajustée que mon fils peut faire ce qu'il veut – c'est fondamental pour moi.»

Mark, père d'Henry



Défis typiques chez les tout-petits Mobilité

Généralement

curieux et presque toujours en mouvement

Corps

Petits ventres ronds

Peau

Sensible, encore en croissance

Pour que les enfants puissent être des enfants

Dès que les enfants peuvent marcher à quatre pattes, ils sont presque toujours en mouvement. Il leur faut alors un dispositif stomial qui tienne. Pour les petits patients entre 6 mois et quatre ans, SenSura® Mio Kids offre une large gamme de produits appropriés 1 pièce et 2 pièces.

Gamme SenSura® Mio Kids Dispositif 1 pièce

Disponible comme poche vidangeable et comme poche urostomiale.



Gamme SenSura® Mio Kids Dispositif 2 pièces

Disponible comme poche vidangeable en deux différentes tailles.



**Notre intention affirmée :
liberté de mouvement maximale**



SenSura[®] Mio Kids – la solution spéciale pour les enfants


SenSura[®] Mio Kids est dotée de tous les détails bien connus des produits SenSura[®] Mio, optimisés en plus pour répondre au besoins des petits patients. Ainsi, SenSura[®] Mio Kids s'adapte largement aux morphologies et aux mouvements des enfants.

Détails partiuliers



Protection élastique cutanée en étoile

- › Avec ses ailettes, la protection cutanée en étoile enserre les petits ventres ronds des enfants et donne une assise sûre.
- › La forme permet un placement flexible de la protection cutanée et rend superflu le découpage d'échancrures.
- › Le matériel élastique de la protection cutanée est doux pour la peau sensible de l'enfant.
- › Les plaques de base n'ont pas de perforation initiale, ce qui permet un positionnement libre, en présence de plusieurs stomies p. ex.

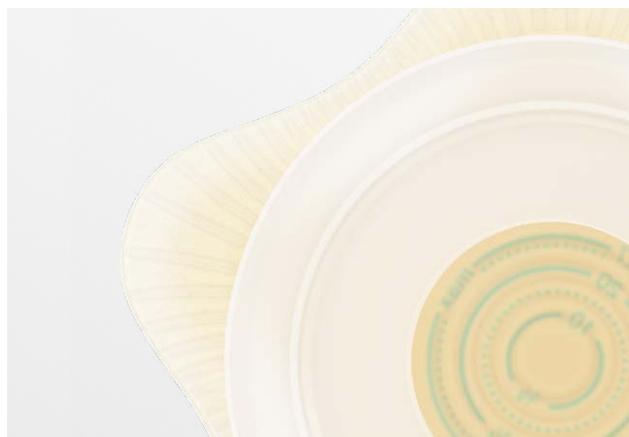


Zones de flexion

- › Les zones de flexion se trouvent sur le bord de la plaque de base.
- › Elles accroissent l'élasticité du dispositif et favorisent un bon ajustement à l'environnement péristomial.
- › Les zones de flexion donnent une plus grande liberté de mouvement aux enfants.



Technologie BodyFit

- › La technologie BodyFit garantit un bon ajustement du dispositif stomial au corps, indépendamment de la morphologie.
- › Epouse les morphologies individuelles et les mouvements des enfants, garantissant de la sorte une assise sûre.

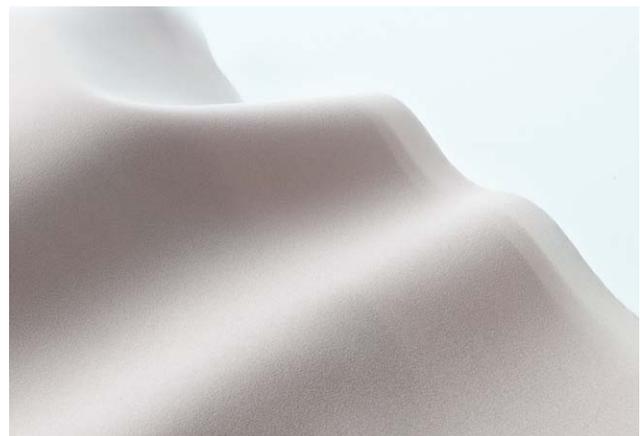

Matériel textile gris clair

- › Le textile gris clair dermophile donne un aspect neutre, non médical.
- › La couleur neutre est discrète, même sous des vêtements fins et blancs.
- › Matériel hydrophobe.



Filtre annulaire unique en son genre

- › La forme spéciale du préfiltre annulaire retarde le blocage du filtre.
- › Le filtre annulaire réduit le gonflement de la poche.



Adhésion flexible

- › Apposition en douceur même sur les zones sensibles et les petits ventres tendres.
- › La plaque de base se fixe sur la poche d'un simple effleurage de la main.
- › Agréable à porter, sans limitation de la liberté de mouvement.
- › La partie adhésive est extrêmement plate, souple et n'ajoute guère d'épaisseur.



Produits complémentaires

Le spray Brava® anti-adhésif pour SenSura® Mio Baby

Le spray anti-adhésif à base d'huile répond aux plus hautes exigences qu'impose la peau des prématurés et des nouveau-nés. Il a été spécialement conçu pour enlever en douceur la plaque de base SenSura® Mio Baby.

Pour de plus amples informations sur SenSura® Mio Baby et Kids, veuillez vous référer à : de.coloplast.ch/baby-kids

1 Levy et al., Impact of Hands-On Care on Infant Sleep in the Neonatal Intensive Care Unit, *Pediatr Pulmonol*, 2017.

2 Zeiner et al., Preterm Infants Behavior and Skin Conductance Resposes to Nurse Handling in NICU, *J Matern Fetal Neonatal Med*, August 2016.

Commandes

SenSura® Mio Baby

Plaquette de base sans préperforation, avec traitement de surface stérile



Référence	Taille de la stomie	Pce/Unité	Pharmacode
187050	0 – 40 mm	5	7452656

Poche d'iléostomie, avec robinet de vidange souple et fenêtre d'application, stérile



Référence	Couleur	Volume	Pce/Unité	Pharmacode
187000	transparent	160 ml	10	7452633

Brava® Spray de retrait d'adhésif pour SenSura® Mio Baby

Ne contient pas d'alcool



Référence	Contenu	Produit	Pce/Unité	Pharmacode
120140	3 ml	Sachet	30	7452627

SenSura® Mio Kids

Poche d'iléostomie, avec robinet de vidange Hide-away®, sans préperforation



Référence	Couleur	Volume	Taille de la poche	Taille de la stomie	Pce/Unité	Pharmacode
187100	gris clair/opaque	180 ml	midi	0 – 35 mm	10	7452662

Poche d'urostomie



Référence	Couleur	Volume	Taille de la poche	Taille de la stomie	Pce/Unité	Pharmacode
187120	transparente	200 ml	midi	10 – 35 mm	10	7452679

Plaquette de base, sans perforation



Référence	Anneau adhésif	Taille de la stomie	Pce/Unité	Pharmacode
187350	● 27 mm	0 – 27 mm	5	7452722
187470	● 35 mm	0 – 35 mm	5	7452739

Poche d'iléostomie, avec robinet de vidange Hide-away®



Référence	Couleur	Volume	Anneau adhésif	Taille de la poche	Pce/Unité	Pharmacode
187200	gris clair/opaque	85 ml	● 27 mm	mini	10	7452685
187220	gris clair/opaque	200 ml	● 27 mm	midi	10	7452691
187240	gris clair/opaque	200 ml	● 35 mm	midi	10	7452716

Coloplast propose des produits et des services qui facilitent la vie de personnes qui ont des besoins médicaux très personnels. En étroite collaboration avec des professionnels et des utilisateurs, nous développons des solutions pour améliorer leurs soins.

Nous vendons des produits de haute qualité pour les soins des stomies, de l'incontinence et des plaies ainsi que pour les soins de la peau et l'urologie. Nous sommes une entreprise mondiale qui compte plus de 12 000 employés.