

# Vermeidung von Druckstellen unter Schutzkleidung




## Anleitung zum Zuschneiden von Comfeel® Plus Transparent

1.




Typische Bereiche, in denen Hautreizungen und Druckstellen durch Schutzbrillen und -masken auftreten können: **Wangen, Nase, Stirn**

2.

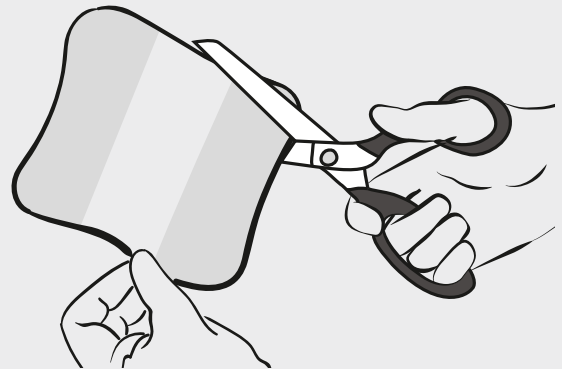

Schneiden Sie den Verband für die betroffenen Hautpartien zu. Entfernen Sie die Schutzfolien zunächst noch nicht.

3.

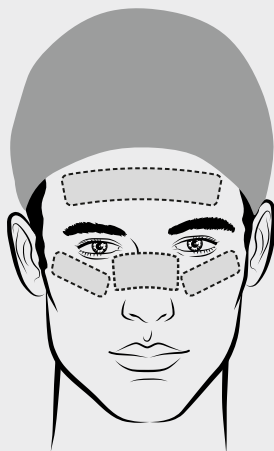

Applizieren Sie den Verband mit der haftenden Seite auf die Haut. Streichen Sie dann vorsichtig über das Produkt, um die Haftung auf der Haut zu optimieren.

4.



Setzen Sie anschliessend Ihre Schutzbrillen und Schutzmasken auf.

Die Haut sollte vollständig trocken sein, bevor Sie Comfeel® Plus Transparent applizieren.

# Bestellinformation

## Comfeel® Plus Transparent



| Artikel-Nr. | Grösse/cm | St./VE | Pharmacode | MiGeL Nr.     |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|
| 335300      | 5 × 7     | 10     | 6823470    | 35.05.02.01.1 |
| 335330      | 10 × 10   | 10     | 6823493    | 35.05.02.03.1 |
| 335480      | 5 × 25    | 5      | 6823524    | 35.05.02.03.1 |
| 335360      | 9 × 14    | 10     | 6823487    | 35.05.02.03.1 |
| 335420      | 15 × 20   | 5      | 6823501    | 35.05.02.05.1 |
| 335471      | 5 × 15    | 5      | 6823518    | 35.05.02.02.1 |
| 335370      | 9 × 25    | 5      | 6823530    | 35.05.02.04.1 |