


Utilisation de Comfeel® Plus Transparent sous masques et lunettes de protection pour protéger la peau




1.

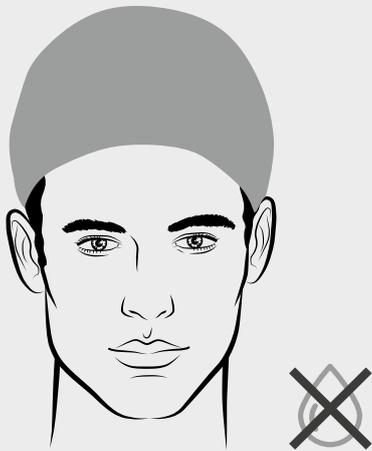


Assurez-vous que la peau soit **complètement sèche** avant l'application du produit.

2.

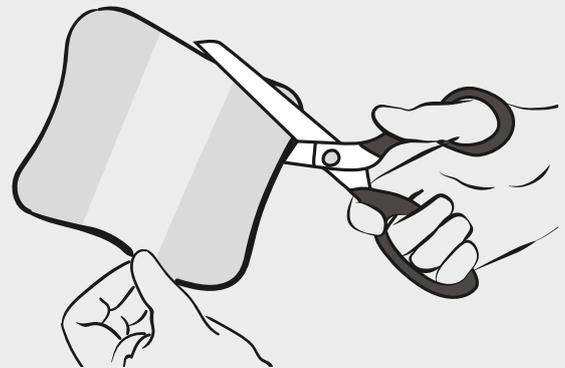

Découpez le pansement aux dimensions nécessaires pour couvrir le nez, le front et les pommettes. Arrondissez les angles pour une meilleure adhérence.

3.

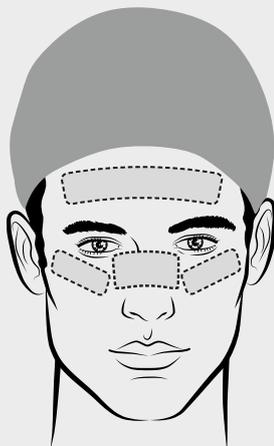

Retirez le feuillet protecteur transparent, appliquez la face adhésive sur la peau. Appuyez légèrement sur les bords du pansement pour une meilleure adhésion.

4.



Mettez le masque et les lunettes de protection.

Informations sur la commande

Comfeel® Plus Transparent



Référence	Taille en cm	Unité de vente	Pharmacode	LIMA No.
335300	5 × 7	10	6823470	35.05.02.01.1
335330	10 × 10	10	6823493	35.05.02.03.1
335480	5 × 25	5	6823524	35.05.02.03.1
335360	9 × 14	10	6823487	35.05.02.03.1
335420	15 × 20	5	6823501	35.05.02.05.1
335471	5 × 15	5	6823518	35.05.02.02.1
335370	9 × 25	5	6823530	35.05.02.04.1