

Allrinse® – Wundspüllösung zur effektiven Wundreinigung

Allrinse Anwendung bei einer Amputationswunde

Beläge können gelöst und die Wundheilung gefördert werden.



Effektive Wundreinigung

- › Lösen und Aufbrechen von Belägen und Biofilm
- › Lösen von Verkrustungen und anhaftenden Verbänden

Durch besonders gut verträgliche Tensidkombination in effektiver Konzentration.



Fördert die Wundheilung

- › Unterstützt ein optimales Wundheilungsmilieu
- › Führt zur Überwindung der chronisch-stagnativen Heilungsphase

Durch sauren pH-Wert mit einem zur Stabilisierung enthaltenen Zink-Eisen-Komplex.



Reduziert das Infektionsrisiko

- › Vermindert die Keimbelastung
- › Effektive Dekontamination von belegten und kontaminierten Wunden (z. B. MRSA)

Durch sauren pH-Wert und PHMB.

Allrinse®

 Coloplast

Indikationen

- › Zur Reinigung und Befeuchtung von akuten und chronischen Wunden, z. B. Schürf-, Riss- und Schnittwunden, Verbrennung 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Diabetisches Fussulcus und Dekubitus
- › Zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen beim Verbandwechsel
- › Zur Dekontamination
- › Anwendung auch im Bereich des Mundes und der Schleimhäute



Jetzt noch mehr über
Allrinse erfahren!

Einfache Anwendung

Wundreinigung

Wunde mit Allrinse intensiv spülen bzw. einsprühen. Bei starkem Wundbelag 10 – 15 Min. einwirken lassen (nasser Umschlag). Nachspülen ist nicht erforderlich.

Befeuchtung der Wunde

Verbände und Wundauflagen ausreichend mit Allrinse befeuchten. Wenn möglich jeden 2. Tag wiederholen.

Die Lösung ist konserviert und nach Anbruch 3 Monate lang haltbar. Sie eignet sich zur wiederholten und langfristigen Verwendung, sie ist hautfreundlich und dermatologisch unbedenklich, geruchlos und kompatibel mit Produkten der Wundversorgung.

Bestellinformationen

Allrinse® Wundspüllösung

Pharmacode	Artikel-Nr.	MiGeL Nr.	Inhalt	St./VE
1110080	220P4795	99.12.0.00.1	Spray, 500 ml	1

Ostomy Care / Contience Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology / Voice and Respiratory Care

PM 31407

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz, Tel. +41 79979-79, swissinfo@coloplast.com
www.coloplastprofessional.ch The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2024-05. All rights reserved Coloplast A/S

