


# Comfeel® Plus

Schutz und Behandlung akuter  
und chronischer Wunden

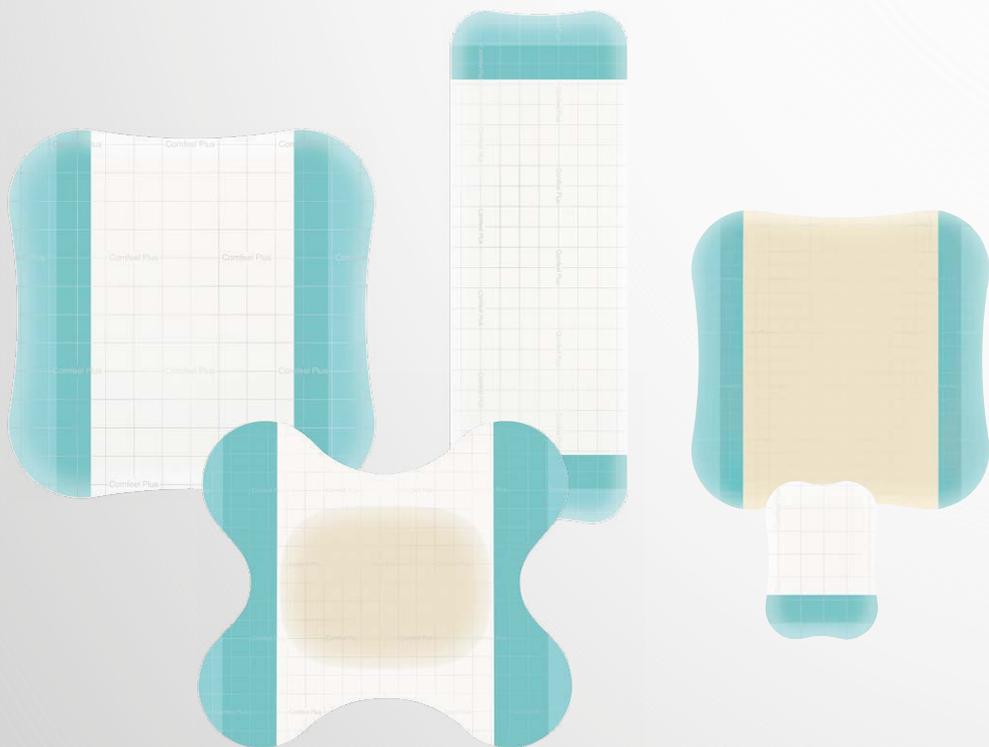

Weniger Tage mit Wunden

Comfeel® Plus

# Mehr als 30 Jahre Erfahrung

## Schutz und Behandlung



### Schutz der Wunde

- › Reduktion von Reib- und Scherkräften
- › Einfache Wundinspektion



### Beschleunigte Wundheilung<sup>1,2</sup>

- › Schaffen eines feuchten Wundheilungsmilieus



### Geeignet für den täglichen Gebrauch


- › Mehr Komfort für den Patienten
- › Transparent und unauffällig
- › Einfache und aseptische Anwendung

## Wirkungsweise



- › Es wird in Kontakt mit dem Wundexsudat ein kohäsives Gel gebildet, welches die Wunde schützt und ein Verkleben mit dem neu gebildeten Epithel verhindert
- › Ein feuchtes Wundmilieu wird gewährleistet
- › Förderung der Wundheilung<sup>1,2</sup>

# Einsatz der Hydrokolloide in der Wundversorgung

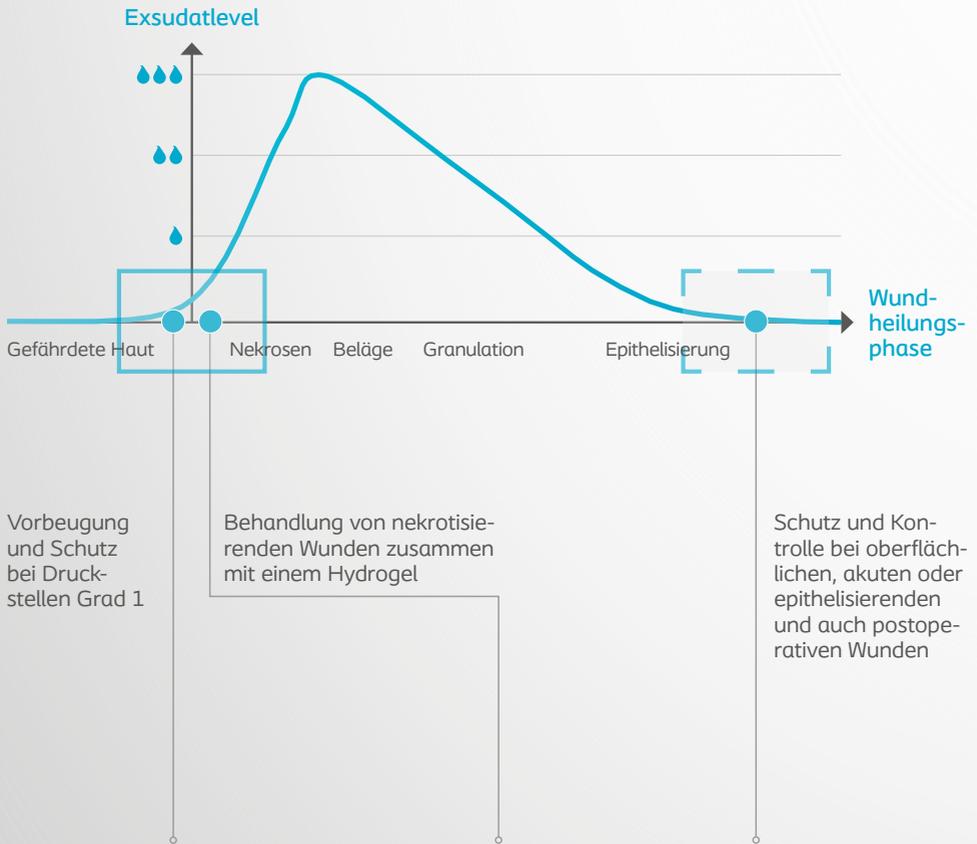

# Comfeel® Plus Transparent

## Comfeel® Plus


### Comfeel® Plus Contoured

#### Hydrokolloid- verbände



#### Hypoallergen

Ohne Kolophonium,  
ohne Latex, keine Substan-  
zen tierischen Ursprungs

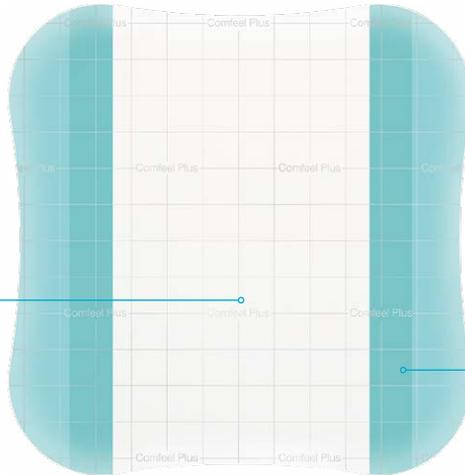

konkave Form und  
abgeflachte Ränder

3-teilige Non-  
Touch-Technologie\*

#### › Akute und chronische Wunden

Hautabschürfungen, Schnitte, Verbrennungen  
(1. und 2. Grades), Ulcus cruris, Dekubitus, etc.



#### › Postoperative Wunden

Hüft-/Knieprothese, Laparotomie,  
Thorakotomie, etc.



#### › Besonders lokalisierte Wunden


Kreuzbein, Ellbogen, etc.



\*für eine aseptische Applikation

# Wie wird Comfeel® Plus angewendet?

- › Reinigen Sie die Wunde
- › Trocknen Sie die Wundumgebung bevor Sie Comfeel® Plus applizieren
- › Die Haut muss frei von Fettstoffen sein
- › Produkt auf Körpertemperatur erwärmen

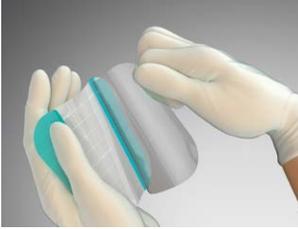

Nehmen Sie den Verband aus der Folie. Verwenden Sie die farbigen Schutzfilme, um aseptisch zu applizieren. Entfernen Sie den transparenten Schutzfilm in der Mitte.



Applizieren Sie die selbsthaftende Seite Richtung Wunde. Entfernen Sie die türkisfarbenen Schutzfilme nacheinander.



Fahren Sie mit den Fingern behutsam um den Rand des applizierten Verbandes, damit der Verband gleichmäßig und glatt auf der Wunde haftet.

# Wie entferne ich Comfeel® Plus ?



Für ein sanftes Ablösen heben Sie die Haftung auf, indem Sie den Verband Stück für Stück vom Rand aus überdehnen.



Ziehen Sie den Verband nicht hoch.



Wiederholen Sie den Vorgang für jede Seite, indem Sie den Verband überdehnen und somit ein atraumatisches Entfernen ermöglichen.

**Sie können auch Pflasterentfernungsspray für ein noch sanfteres Ablösen verwenden.**



Lesen Sie bitte vor der Applikation die Gebrauchsanweisung.

# Produktinformationen Comfeel® Plus

## Hydrokolloidverbände

### Comfeel® Plus



Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharma-code
331100	10 x 10	10	1834718
331150	15 x 15	5	1834724
331200	20 x 20	5	1834747

### Comfeel® Plus Transparent



Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharma-code
335300	5 x 7	10	6823470
335330	10 x 10	10	6823493
335480	5 x 25	5	6823524
335360	9 x 14	10	6823487
335420	15 x 20	5	6823501
335470	5 x 15	5	6823518
335370	9 x 25	5	6823530

### Comfeel® Plus Contoured



Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharma-code
332800	6 x 8	5	1834753
332830	9 x 11	5	1834776

	Leicht		Wasserfest
	Leicht - Mittel		Zuschneidbar

#### Referenzen

- 1 Singh et al. Asian journal of surgery vol 27, n°4, october 2004, Meta-analysis of Randomized Controlled Trials on Hydrocolloid Occlusive Dressing Versus Conventional Gauze Dressing in the Healing of Chronic Wounds.
- 2 Thomas S. Hydrocolloid dressings in the management of acute wounds: a review of the literature. Int Wound J 2008. 5: 602 – 613.

Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology



220N W 324 D / PM-19568

[www.coloplast.ch](http://www.coloplast.ch) The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.  
© 2022-05. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Coloplast AG  
Euro-Business-Center  
Blegistrasse 1  
CH-6343 Rotkreuz  
Tel. +41 41 79979-79  
Fax +41 41 79979-40  
[swissinfo@coloplast.com](mailto:swissinfo@coloplast.com)