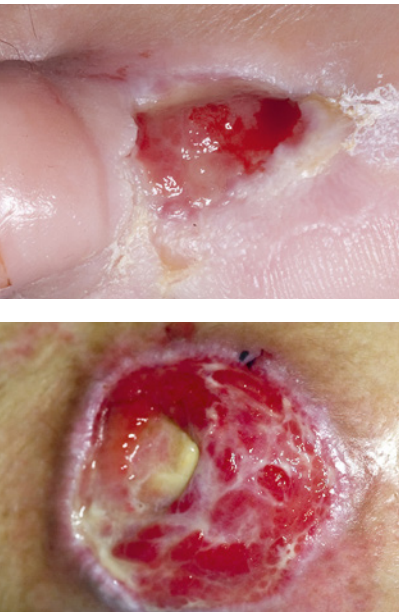
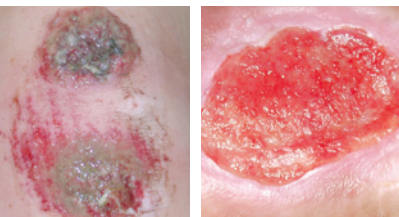


# Lokale Therapie in der Wundversorgung

| Infizierte Wunde  Mässig – Stark  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WUNDBILD</b><br>                                                                                                 | <b>BEHANDLUNGSZIEL</b><br><p><b>Exsudatmanagement</b><br/>Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Keimabtötung</b><br/>Lokale Antiseptika, antimikrobielle Therapie</p> | <b>REINIGUNG</b><br><p><b>Biatain® Alginate Ag</b></p>  <p>+</p> <p><b>Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge</b></p> | <b>PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm</b><br><p><b>Biatain® Silicone Ag</b></p>  <p><b>Biatain® Ag nicht-/selbst-haftend</b></p> <br><b>PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE &gt; 2 cm</b><br><p><b>Biatain® Alginate Ag</b></p>  <p>+</p> <p><b>Biatain® Silicone oder Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p>  |

| Nicht-infizierte Wunde  Mässig – Stark  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WUNDBILD</b><br>                                                                                                      | <b>BEHANDLUNGSZIEL</b><br><p><b>Exsudatmanagement</b><br/>Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Keimreduktion</b><br/>Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspüllösung</p> <p>+</p> <p><b>Gewebeaufbau</b><br/>Wundruhe</p> | <b>REINIGUNG</b><br><p><b>Biatain® Fiber oder Biatain® Alginate</b></p>  <p>+</p> <p><b>Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge</b></p> | <b>PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm</b><br><p><b>Biatain® Silicone</b></p>  <p><b>Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p> <br><p><b>Biatain® Contact</b></p>  <p>+</p> <p><b>Stark absorbierenden Sekundärverband</b></p><br><b>PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE &gt; 2 cm</b><br><p><b>Biatain® Fiber oder Biatain® Alginate</b></p>  <p>+</p> <p><b>Biatain® Silicone oder Biatain® nicht-/selbst-haftend</b></p>  |

| Nicht-infizierte Wunde/Akutwunde Leicht  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WUNDBILD</b><br>                       | <b>BEHANDLUNGSZIEL</b><br><p><b>Exsudatmanagement</b><br/>Optimal feuchtes Wundmilieu</p> <p>+</p> <p><b>Epithelisierung</b><br/>Wundruhe / Gewebeschutz</p> | <b>REINIGUNG</b><br><p><b>Purilon® Gel</b></p>  | <b>PRODUKTEMPFEHLUNG</b><br><p><b>Biatain® Silicone Lite</b></p>  <p><b>Biatain® Contact</b></p>  <p>+</p> <p><b>Comfeel® Plus / Comfeel® Plus Transparent</b></p>  |

\* Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge erforderlich